

**Інструкція з використання:**

**M'які контактні лінзи, місячні Comfort Line OXY, сілікон-гідрогелеві; M'які контактні лінзи торичні, місячні Comfort Line OXY, сілікон-гідрогелеві;**  
**M'які контактні лінзи мультифокальні, місячні Comfort Line OXY, сілікон-гідрогелеві;**

**M'які контактні лінзи місячні Comfort Line AQUA 55UV, гідрогелеві; M'які контактні лінзи торичні, місячні Comfort Line AQUA 55UV, гідрогелеві; M'які контактні лінзи, одноденні, Comfort Line MYCOLOR, гідрогелеві**

**Виробник: INTEROJO INC. /ІНТЕРОДЖО ІНК., 28&25 Сандан-ро 15 беон-гп. Пхъонгхек-сі, Кіңгідо, 177 44. Корея**

**Уповноважений представник виробника:**

**ТОВ «КОМФОРТ-Лайн-ЮКРЕЙ», Україна, місто Дніпро, вулиця Молодогвардійська, будинок 10, квартира 32, сайт: comfortline.net.ua, e-mail: d\_ukraine@ua.fm, тел.: 0 800 330 297**

**Призначення: Корекція зору**

Описаний тут продукт використовується для корекції зору. Як зберігати перед використанням: рекомендована температура зберігання лінз +1 ~ +30

**\*Як використовувати**

1. Застереження перед використанням

- Dотримуйтесь інструкції з використання для користувача або інструкції фахівців.
- Обов'язково мите руки перед тим, як одягати або знімати лінзи.
- Будьте обережні, щоб нігти не завдали шкоди лінзам.
- Перевірте, чи не перегортаються лінзи під час носіння.
- Будьте обережні, щоб косметика, лосьйони, мило, креми, дезодоранти не контактували з очима або лінзами.
- Визначайте передньо і задню частини M'яких лінз.



Передня сторона



Задня сторона

**2. Як носити і знімати лінзи**

**1) Як носити лінзи**

- Промінте лінзи розчином для очищення.
- Покладіть лінзу на вказівний пальцем правої руки, потянувшись ніжно повіки середнім пальцем, підніміть верхню повіку вказівним пальцем іншої руки.
- Дивіться у дзеркало, обережно підніміть лінзу і м'яко покладіть її на рогівку.
- Після того, як лінза правильно пристала до рогівки, повільно відведіть пальці, що тримають повіки.
- Обережно закрійте очі і рухайте зінчице, щоб лінза була правильно розташована.

**2) Як знімати лінзи**

- Омийте руки перед зніманням лінз.
- Дивіться у дзеркало, перевірте положення лінз.
- Дивіться вгору, щоб зінчиця була звернена догори.
- Підніміть верхню повіку пальцем лівої руки і відтягніть лінзу вказівним пальцем правої руки, витягніть лінзу вказівним пальцем правої руки.

**3. Використання і догляд**

Розташуйте лінзи на допоні і додайте 2-3 краплі розчину (або обмочить їх розчином) та ніжно протріть лінзу пальцем.

**Промивання**  
Після промивання ополосніть лінзи розчином по додгляду та помістіть лінзи в правій або лівій відсік контейнера з розчином для зберігання.

**Полоскання**  
Після промивання ополосніть лінзи розчином по додгляду та помістіть лінзи в правій або лівій відсік контейнера з розчином для зберігання.

**Стерилізація (хімічна)** Заповніть контейнер розчином для зберігання та залиште його протягом часу, визначеного виробником

**Зберігання** Використовуйте спеціальний розчин для зберігання, щоб M'які лінзи не мали можливості висохніти.

**4. Призначення, ефект і ефективність.** Це однофокальні лінзи, які прикреплюються безпосередньо до одного яблука і коригують зір.

**\* Заходи безпеки**  
1. Не використовуйте, якщо у вас наявні захворювання очей або алергія на контактні лінзи.

2. Перевірте, чи маєте ви системні захворювання або захворювання очей, проконсультуйтесь з лікарем і дотримуйтесь його вказівок.

3. Якщо під час використання ви відчуваєте сильний біль або маєте подразнення, припиніть використання і проконсультуйтесь з лікарем

4. Якщо зір став нестабільним внаслідок сухості поверхні лінз, нанесіть розчин штучних спіл і проблематично кілька разів, що може вирішити проблему.

5. При перевтомі, видутості сну, довгому читанні та ін., що призвело до хворобливості очей, спробуйте зупинити носіння лінз і відпочити.

6. Якщо ви використовуєте мило, шампунь, спреї і косметику, будьте обережні, щоб вони не контактували з лінзами; макіяж треба наносити після одягання лінз.

7. При стерилізації, промиванні, полосканні або змащуванні використовуйте відповідний розчин.

8. При використанні фізіологічного розчину, розчину для очищення та розчину для зберігання, обов'язково використовуйте продукти, які виробляються відповідними спеціалізованими компаніями, ніколи не використовуйте водопровідну воду, кип'ячену воду або інші неадекватні продукти.

9. Зберігайте контактні лінзи у спеціальному розчині для зберігання.

10. Будьте обережні, щоб нігти не пошкодили лінзи.

11. Мите руки перед тим, як одягати лінзи.

12. Оскільки контактні лінзи можуть бути пошкоджені, заржани або зламані, іх не слід очищати папером, тканинами або серветкою з мікрофибрі.

13. Під час купання або прийняття душу обов'язково знімайте лінзи та носіть очікуляри для плавання.

14. Не використовуйте очні краплі під час носіння лінз. Спробуйте одягти лінзи не менше ніж за чотири години після застосування очніх крапель.

15. Не перевищуйте термін придатності лінз і не використовуйте лінзи більше терміну та пошкоджені

16. Не використовуйте лінзи, що використовувалися іншою людиною.

17. Рекомендована тривалість носіння лінз - 8 годин на добу. Обов'язково знімайте лінзи перед сном.

18. Вагітні жінки повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням лінз.

19. Ті, хто тривалий час в умовах роботи піддається сильній кислотності, slabkій лужності, впливу пилу або металу, повинні утримуватися від використання лінз.

20. При тривалий час в умовах роботи піддається сильній кислотності, slabkій лужності, впливу пилу або металу, повинні утримуватися від використання лінз.

21. При повторному використанні лінз обов'язково попередньо їх промивайте.

22. Периодично мите інструменти (крім лінз), аби вони залишалися чистими

23. Міття лінз ультразвуковими хвильами може розривати лінзи, тому будьте обережні при використанні.

24. Не використовуйте при пошкодженні стерилізовані упаковки.

25. При носінні контактних лінз будьте обережні, щоб не перепутати ліву і праву лінзи, рекомендуюмо - завжди починати з правого ока. Контейнери для зберігання позначені різною символікою для правого та лівого ока.

**\* Як реагувати на симптоми під час носіння контактних лінз****• Початкові симптоми**

Симптоми	Причини	Лікування
----------	---------	-----------

Надмірна сльозотечія. Розплівчастість бачення. Лінзи легко повертаються. Незнанче перенавантаження. Відчуття подразнення. Надмірна сльозотечія і занадто сильне подразнення.

Це цілком природні симптоми, що з'являються одразу після одягання лінз. Якщо це продовжує турбувати, краще звернутися до фахівця.

Неналежне промивання.

Обережно промивайте лінзи розчином для очищення і ретельно ополіскуйте їх розчином для зберігання перед використанням.

Відчуття гострого болю і багато виділення

Відкладення на лінзах сторонніх речовин внаслідок тривалого носіння лінз. Проблеми або з лінзами, або з очима.

Негайно зверніться до лікаря і дотримуйтесь його рекомендацій.

**• Тривалі симптоми**

Симптоми	Причини	Лікування
----------	---------	-----------

Розплівчастість бачення.

Відкладення на лінзах сторонніх речовин.

Промійті лінзи мицічим розчином і, якщо симптоми не зникають виділити сторонні речовини розчином для видалення білка. Вимійті лінзи та зверніться до фахівця.

Подразнення/біль

Сторонні речовини, пил або подряпини на лінзах.

Перевантаження та размиття

Відкладення жиру або білу на лінзах, або занадто тривале носіння.

Обережно промійті лінзи. Зніміть лінзи і відпочиньте.

Перевіряйте свої очі щодня, і якщо ви відчуваєте щось ненормальне, спробуйте вицезазначені заходи. Якщо симптоми продовжуватимуть турбувати, проконсультуйтесь з лікарем-офтальмологом.

**\* Заходи безпеки для побічних ефектів**

Якщо виникають проблеми, наведені нижче, перевірте заходи безпеки.

- Подразнення, відчуття подразнення від лінз
- Очи опухли і болічі
- Очи захворювання, такі як кон'юнктивіт, кератит
- Надмірна сльозотечія
- Аномальна кількість секреції
- Перевантаження і сухість очей
- Обмеженість або порушення зору
- Среоли навколо об'єкти
- Обертання лінз через зміщення вісі (торичні)
- Обертання лінз і переміщення з вісі (торичні)

**Коригувальні заходи**

- Зніміть лінзи. Якщо проблема зникне, перевірте лінзи і, навіть якщо вони не виникає проблем, проконсультуйтесь зі своїм офтальмологом перед повторним використанням.
- Якщо лінзи забруднені, промійті їх або знову вставте. Якщо проблема виникає знову, зверніться до лікаря-офтальмолога.

**\* Заборонено**

Ті, хто має симптоми, наведені нижче, не повинні використовувати лінзи

- Гостре або напівгостре запалення між лінзами і рогівкою і рабдійною оболонкою
- Інші захворювання очей, травми, проблеми рогівки і вій
- Незручність, біль, свербіж, виражена або безперервна сухість очей
- Хвороби, які можуть впливати на очі при носінні лінз
- Алергічна реакція на лінзи
- Системні захворювання, які може впливати на очі яблуко, або можливість того, що носіння лінз може погрішити системні захворювання
- Стан, який робить неможливим дотримання відповідних правил використання лінз.

**\* Значення символів**

Виробник



ВИКОРИСТАВТИ ДО



Інструкція з використання



Стерилізовано парою або сухим теплом



УВАГА



CE 0120



LOT



Дата використання



R Only



Відповідальність тільки за реципієнтом

Дата останнього перегляду 25.08.2023 р.



UA.TR.116



Стерилізовано