

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВСІХ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ ВИРОБНИЦТВА КОМПАНІЇ INTEROJO, A SAME:

- **Morning Q 55** (контактна лінза щомісячної заміни)
- **O₂O₂** (контактна лінза щомісячної заміни)
- **O₂O₂ Toric** (контактна лінза щомісячної заміни)
- **O₂O₂ Multifocal** (контактна лінза щомісячної заміни)
- **Morning Q BIO** (контактна лінза щомісячної заміни)
- **Morning Q 38** (контактна лінза кварталної заміни)
- **Poly Vue HD** (контактна лінза шести місячної заміни)
- **Poly Vue HD Toric** (контактна лінза кварталної заміни)
- **Adria 2 Tone** (контактна лінза кварталної заміни)
- **Adria Festival 1 Tone** (контактна лінза кварталної заміни)
- **Adria Festival 2 Tone** (контактна лінза кварталної заміни)
- **Festival II** (контактна лінза кварталної заміни)
- **Morning Q 1 Day** (контактна лінза щоденної заміни)
- **Bandage** (контактна лінза щомісячної заміни)

ОДЯГАННЯ ЛІНЗ

Перед тим, як брати в руки лінзи, добре вимийте руки та просушіть чистим рушником. Візьміть лінзу у долоню та перевірте, щоб вона не містила на собі бруду, подряпин чи залишків косметики. Потім промийте лінзу універсальним розчином і покладіть її на кінчик вказівного пальця. Переконайтеся, що лінза знаходиться у правильному положенні і не перевернута серединою назовні. Інакше краї лінзи не будуть добре прилягати до ока. Якщо лінза одягнута неправильно, це викличе незручність. Вийміть її з ока і, перш ніж спробувати одягнути її знову, переверніть її у потрібне положення і промийте універсальним розчином. Тримайте повіки відкритими і дивлячись прямо перед собою, помістіть лінзу на центр ока, звертаючи увагу на те, щоб під нею не залишалось повітря. Відпустіть нижню повіку, а потім повільно відпустіть верхню, після чого слід заплющити око. Якщо після одягання лінзи Вам все ж бракує чіткості бачення, можливо, що лінза знаходиться у неправильному положенні, забруднена, або, у випадку з лінзами для корекції зору, на око одягнута лінза, призначена для іншого ока (ліва замість правої). Якщо ж ця проблема залишається, проконсультуйтеся у свого окуліста. Для одягання другої лінзи, повторіть вищезазначені дії.

ЗНЯТТЯ ЛІНЗ

Помийте та висушіть руки. Тримайте голову прямо, подивіться вгору. Тримайте повіки відкритими і піднесіть до лінзи свій вказівний та великий палець так, щоб Ви могли легко затиснути лінзу між цими двома пальцями і обережно зняти її з ока. Якщо зняття лінзи викликає труднощі, капніть у око декілька краплин заспокійливих крапель для очей, почекайте декілька хвилин і спробуйте зняти лінзу знову. Після зняття лінзи візьміть її у долоню та очистіть перед тим, як покласти у футляр для лінз.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Чистіть і дезінфікуйте лінзи перед кожним використанням. Перед будь-якими маніпуляціями з лінзами добре вимийте та висушіть руки. Добре промийте і прополощіть лінзу з обох боків, використовуючи універсальний розчин. Для цього Вам слід помістити лінзу у футляр для лінз і

наповнити його свіжим універсальним розчином. Повторіть це з іншою лінзою. Бажано завжди мати при собі футляр із універсальним розчином, який Вам стане у нагоді у разі необхідності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Уникайте надмірного тримання лінз у руках перед їх одяганням. Це може спричинити подразнення та/або запалення очей. Використовуйте косметику для очей після того, як одягнете лінзи. Знімати косметику слід після зняття лінз. Косметичні засоби на основі води менш здатні пошкоджувати лінзи, ніж масляні. Для зберігання лінз не використовуйте проточну воду, слину, саморобні чи будь-які інші нестерильні розчини, окрім запропонованих, і уникайте потрапляння таких речовин на лінзи. Регулярно змінюйте футляр для лінз. Не носіть лінзи під час плавання, це може викликати подразнення очей. Уникайте потрапляння в очі лосьйонів, кремів або спреїв. Не носіть лінзи у середовищі, в якому присутні хімікати, надмірна забрудненість повітря та висока температура (при користуванні феном).

Після зняття лінз з очей, помістіть їх в універсальний розчин щонайменше на 6 шість годин або на ніч(крім Morning 1Day). Якщо Ви не користуєтесь лінзами довгий час, змінійте універсальний розчин щотижня для збереження їх стерильності. Не одягайте лінзи при подразненні чи почервонінні очей. Не тримайте лінзи всю ніч у соляному розчині, це не захистить їх від мікроорганізмів або інфекцій. Якщо ви відчуваєте незручність або сухість в очах, зніміть лінзи і промийте їх універсальним розчином. Потім зачекайте декілька хвилин і спробуйте одягти лінзи знову. Якщо проблема не зникла, змініть лінзи та порадьтеся зі своїм окулістом. Не носіть лінзи більше ніж 6-8 годин на день. Не обмінюйтесь лінзами з іншими людьми, це може викликати різні інфекції. Не рекомендується спати з одягнутими лінзами. Якщо Ви ніколи раніше не користувались контактними лінзами, краще проконсультуйтеся зі своїм окулістом. Не використовуйте пошкоджених футлярів для лінз. У разі виникнення запалень, патологій та інфекцій, сльозоточивості та/або обмеженої чутливості рогової оболонки, хвороб або алергій, при яких не бажане користування контактними лінзами або засобами догляду за ними, неможливості дотримання необхідної гігієни догляду та очищення контактних лінз, а також при виникненні необхідності прийому препаратів, несумісних з користуванням лінзами, зверніться до лікаря.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Якщо Ви ніколи раніше не користувались контактними лінзами, радимо Вам спочатку одягати їх на дві години, поступово збільшуючи час користування, але не більше ніж 8 годин на день.

ПРОТИПОКАЗАННЯ


Користування цими лінзами може спричинити наступні ускладнення: сльозоточивість, відчуття присутності стороннього тіла в очах, почервоніння очей, чутливість до світла, важкість дивитися вгору, надмірне кліпання повіками, затемнене бачення, надмірна рухливість лінзи. У всіх цих випадках рекомендується консультація окуліста.

У рідких випадках може викликати виразку рогової оболонки ока, що може призвести до погіршення зору. Недотримання гігієни та перевищення рекомендованої кількості годин користування лінзами на день може спричинити розвиток виразкового кератиту. Курці мають більш вищий ступінь ризику захворювання виразковим кератитом.

Стерильно.



Уповноважений представник
в Україні: ТОВ «Лікон» м. Київ,
вул. Верховинна, 35 літера А

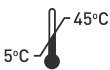

Дивись на
упаковці



Interojo Inc., 25, 28 & 40, Sandan-ro 15 beon-gil,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17744, Korea
Интерджо Инк., 25, 28енд40 Сандан-ро 15беон-жил,
Пьенгтаек-сі, Гьонджи-до, 17744, Корея

Дата останнього перегляду: 12.01.2023