

Краплі зволожуючі для очей та контактних лінз з гіалуроновою кислотою

ESODROP (ЕЗОДРОП) 15 мл

для ВСІХ ТИПІВ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ
ВІДНОВЛЮВАННЯ КОМФОРТУ: ВІДНОВЛЮЄ
ЗВОЛОЖЕНІСТЬ,
ЗМОЧУВАНІСТЬ ТА ПЕРЕНОСИМІСТЬ

ВЛАСТИВОСТІ

Краплі **ESODROP** мають високу здатність відновлювати комфорт завдяки своїй інноваційній формулі з полімерами, які не тільки біологічно переносимі, але й відновлюють зволоження, змочуваність і переносимість контактних лінз під час денного носіння.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Відходить для змащування та зволоження як м'яких, так і жорстких газопроникних контактних лінз.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Ретельно вимийте руки
- Візьміть вже продезінфіковану багатоцільовим розчином лінзу, зі її спеціального контейнеру.
- Нанесіть 2-3 краплі ESODROP на контактну лінзу перед її надяганням.
- Надягніть лінзу.
- Лінзу можна також зволожувати і після надягання, капнувши 1-2 краплі.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Немає встановлених протипоказань, окрім алергії до деяких компонентів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- ESODROP необхідно використати протягом трьох місяців з моменту відкриття.
- Не використовуйте у разі пошкодження захисної пломби.
- Не допускайте контакту наконечника флакону з будь-якою поверхнею.
- Переконайтеся, що флакон добре закритий після використання.
- Зберігайте продукт подалі від джерел тепла, в будь-якому випадку, при температурі нижче 30°C.
- Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не використовуйте в разі гіперчутливості до деяких компонентів.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не замінюйте іншим змочувальним засобом.
- Перед застосуванням будь-якого офтальмологічного препарату під час носіння контактних лінз, зверніться за консультацією до фахівця.

УСКЛАДНЕННЯ:

У разі стійкого нарікання або подразнення, припиніть користування та проконсультуйтеся зі спеціалістом.

СКЛАД:

Полігексаметилен Бігуанід 0.00023%;
Макромoleкулярний гіалуронат натрію 0.2% ,
Едетат натрію 0.1%, Поверхнево-активні речовини 0.0015%, допоміжні речовини та очищена вода до 100%.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки, за умов відсутності пошкоджень та зберігання належним чином.



Суворо дотримуйтесь інструкцій.



ESOFORM s.r.l.
Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo(RO) - Italia



ESOFORM s.r.l.
Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo(PO) - Italia

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Лікон Ко» 03115,
U.A.TR.137 м. Київ, вул. Верховинна,35.

Rev. 2021.01.04

Вироблено в асептичних умовах

СТЕРИЛЬНО



Medical Device

Дата останнього перегляду інструкції
28.12.2023

10501F02Z