

Пероксидний розчин для контактних лінз

ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД) 360 мл

(з контейнером для контактних лінз)

ПЕРОКСИДНА СИСТЕМА з платиновим каталізатором
ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ (окрім кольорових лінз)

ВЛАСТИВОСТІ

ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД) – це стерильний розчин, що містить стабілізований перекис водню (3%), в якості активного інгредієнту, з динатрієм ЕДТА, хлоридом натрію та буфером. Це медичний виріб, що поставляється разом з аксесуаром: контейнером для лінз з платиновим диском-каталізатором для нейтралізації пероксидного розчину.

ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД) підходить для всіх типів контактних лінз, окрім кольорових лінз. З використанням контейнеру для лінз з платинового нейтралізуючого диску, цей розчин не тільки дезінфікує, очищує та видаляє протеїни і брудні відкладення, але також, за умови використання на регулярній основі, гарантує повну стерилізацію лінз.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для дезінфекції, очищення, зволоження та видалення протеїнів та брудних відкладень всіх типів контактних лінз (окрім кольорових лінз).

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте лише той контейнер для лінз та платиновий нейтралізуючий диск, що входить в упаковку з пероксидним розчином
- Ретельно вимийте та просушіть ваші руки перед використанням продукту
- Зніміть лінзу з лівого ока
- Відкрутіть контейнер для лінз, відкритий корпус позначений літерою "L", помістіть її та закрийте ковпачком уникаючи пошкодження лінзи
- Повторіть цю ж операцію з правою лінзою, розміщуючи її в корпусі, позначеному літерою "R".
- Наповніть контейнер для лінз розчином ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД) до позначеного рівня, стежачи за тим, щоб не опуститися нижче його, та помістіть контейнер для лінз.
- Обережно закрийте контейнер, не струшуючи його, та тримайте його в вертикальному положенні.
- В разі правильної роботи продукту, утворюються кисневі пухирці, коли платиновий диск вступає в контакт із розчином. Якщо цього не відбувається, не використовуйте продукт.
- Залиште лінзи зануреними в розчин щонайменше на 6 годин або на ніч.
- Після закінчення часу нейтралізації, лінзи можна одягати.
- В разі потреби, промийте лінзи сольовим розчином.
- Якщо час нейтралізації перевищує 24 години, повторіть процес очищення.
- Спорозніть контейнер, промийте контейнер та контейнер для лінз сольовим розчином та залиште для просихання. Не використовуйте проточну воду.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Не використовуйте продукт, якщо маєте на алергію на будь-який з інгредієнтів.
- Ніколи не вставляйте лінзи безпосередньо в око після змочування їх розчином ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД), якщо вони не пройшли спершу процес нейтралізації.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Використайте розчин протягом 2 місяців після відкриття; після закінчення цього часу, залишки розчину ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД) необхідно утилізувати.
- Щільно закривайте флакон після кожного використання.
- Зберігайте продукт подалі від джерел тепла та сонячних променів.
- Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності.
- Не торкайтеся наконечника флакона щоб не забруднити розчин.
- Не використовуйте продукт, якщо пломба пошкоджена. Цей продукт є стерильним до моменту відкриття.
- Не використовуйте ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД), якщо пломбу було піддроблено.
- Не знімайте кришку контейнера під час дезінфекції лінз.
- Переконайтеся що диск каталізатор щільно зафіксований.
- Не використовуйте контейнер для лінз з платиновим нейтралізуючим диском з іншим розчином окрім ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД).
- Контейнер для лінз необхідно замінювати раз на місяць або щоразу, коли відкривається новий флакон, в коробці якого іде новий нейтралізуючий контейнер для лінз.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- Не ковтати.
- Не використовувати з кольоровими лінзами.
- Не використовуйте проточну воду для ополіскування лінз. Завжди використовуйте сольовий розчин.
- ESOXIDE (ЕЗОКСАЙД) не має вступати в контакт з очима, тому що це викликає серйозні подразнення; в такому випадку, ретельно промийте проточною водою впродовж декількох хвилин
- Проконсультуйтеся з вашим лікарем-офтальмологом перед використанням будь-яких офтальмологічних препаратів під час носіння контактних лінз.
- Уважно прочитайте інструкцію-вкладиш.

УСКЛАДНЕННЯ:

Перевірте користування та проконсультуйтеся з вашим спеціалістом, якщо у вас з'явилася запалення, стійке подразнення або інші проблеми.



Суворо дотримуйтесь інструкцій.

СКЛАД:

Перекис водню 3%, EDTA 0.03%, Буферний фосфатний розчин, хлорид натрію, допоміжні речовини та очищена вода.

СТЕРИЛЬНО

STERILE A

Вироблено
в асептичних умовах



ESIFORM s.r.l.

Viale del Lavoro, 10 45100 Rovigo(RO)

- Italia

ЕЗОФОРМ с.р.л.

Виале дель Лаворо, 10 45100 Ровіго(РО)

- Італія



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Лікон Ко» 03115,

м. Київ, вул. Верховинна,35.

UA.TR.137

Rev. 2021.01.04



CE 0425

MD

Medical
Device

Дата останнього перегляду інструкції 28.12.2023

10202F029