



CP0119-001

Інструкція з використання: Лінзи контактні м'які COMFORT LINE Unica (КОМФОРТ ЛАЙН Уніка), одноденні/Лінзи контактні м'які COMFORT LINE Unica (КОМФОРТ ЛАЙН Уніка), одноденні, торичні/Лінзи контактні м'які, COMFORT LINE MYCOLOR (КОМФОРТ ЛАЙН МАЙКОЛОР), кольорові, місячні

NEO VISION Co. Ltd./ НЕО ВІЖН КО.ЛТД.
129-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea / 129-1 Донгхвагондан-ро, Мунмак-еуп, Вонджу-сі, Гангвон-до, Корея.

Уповноважений представник виробника:
ТОВ "ВІЖНПЛАС ЮКРЕЙН", УКРАЇНА,
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вулиця Філософська, буд. 84, корп. 25, кімната 117,
сайт: neovision.com.ua, e-mail: vplus@vpu.com.ua,
тел.: 0 800 330 297

Призначення: Корекція зору

Описаний тут продукт являє собою медичний виріб

Як зберігати перед використанням: рекомендована температура зберігання лінз +1 - +30

*Як використовувати

1. Застереження перед використанням

- 1) Дотримуйтесь інструкцій з використання для користувача або інструкцій фахівців.
- 2) Обов'язково мийте руки перед тим, як одягати або знімати лінзи.
- 3) Будьте обережні, щоб нігті не завдали шкоди лінзам.
- 4) Перевіряйте, чи не перегортаються лінзи під час носіння.
- 5) Будьте обережні, щоб косметика, лосьйони, мило, креми, дезодоранти не контактували з очима або лінзами.
- 6) Визначаєте передню і задню частини м'яких лінз.



Передня сторона



Задня сторона

2. Як носити і знімати лінзи

1) Як носити лінзи

- ① Промийте лінзи розчином для очищення.
- ② Покладіть лінзу на вказівний палець правої руки і, потягнувши нижню повіку середнім пальцем, підніміть верхню повіку вказівним пальцем іншої руки.
- ③ Дивлячись у дзеркало, обережно підніміть лінзу і м'яко покладіть її на рогівку.
- ④ Після того, як лінза правильно пристала до рогівки, повільно відведіть пальці, що тримають повіку.
- ⑤ Обережно закрийте очі і рухайте зіницею, щоб лінза була правильно розташована.

2) Як знімати лінзи

- ① Вимийте руки перед зняттям лінзи
- ② Дивлячись у дзеркало, перевірте положення лінз.
- ③ Подивіться вгору, щоб зіниця була звернена догори.
- ④ Піднявши верхню повіку пальцем лівої руки і відтягнувши вниз нижню повіку середнім пальцем правої руки, витягніть лінзу вказівним пальцем правої руки.

3. Використання і догляд

Промивання	Розташуйте лінзи на долоні і додайте 2-3 краплі розчину (або обмочіть їх розчином) та ніжно протріть лінзу пальцем.
Полоскання	Після промивання ополосніть лінзи розчином по догляду та помістіть лінзи в правий або лівий відсік контейнера з розчином для зберігання.

Стерилізація (хімічна)	Заповніть контейнер розчином для зберігання та залиште його протягом часу, визначеного виробником
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Зберігання	Використовуйте спеціальний розчин для зберігання, щоб м'які лінзи не мали можливості висохнути.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Призначення, ефект і ефективність.

Це однофокальні лінзи, які прикріплюються безпосередньо до очного яблука і коригують зір.

* Заходи безпеки

1. Не використовуйте, якщо у вас наявні захворювання очей або алергія на контактні лінзи.
2. Перевірте, чи маєте ви системні захворювання або захворювання очей, проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтесь його вказівок.
3. Якщо під час використання ви відчуваєте сильний біль або маєте подразнення, припиніть використання і проконсультуйтеся з лікарем
4. Якщо зір став нестабільним внаслідок сухості поверхні лінз, нанесіть розчин штучних сліз і проблимайте кілька разів, що може вирішити проблему.
5. При перетомі, відсутності сну, довгому читанні та ін., що призвело до хворобливості очей, спробуйте зупинити носіння лінз і відпочити.
6. Якщо ви використовуєте мило, шампунь, спреї і косметику, будьте обережні, щоб вони не контактували з лінзами; макіяж треба наносити після одягання лінз.
7. При стерилізації, промиванні, полосканні або змачуванні використовуйте відповідний розчин.
8. При використанні фізіологічного розчину, розчину для очищення та розчину для зберігання, обов'язково використовуйте продукти, які виробляються відповідними спеціалізованими компаніями, ніколи не використовуйте водопровідну воду, кип'ячену воду або інші невідповідні продукти.
9. Зберігайте контактні лінзи у спеціальному розчині для зберігання.
10. Будьте обережні, щоб нігті не пошкодили лінзи.
11. Мийте руки перед тим, як одягати лінзи.
12. Оскільки контактні лінзи можуть бути пошкоджені, заражені або зламані, їх не слід очищати папером, тканинами або серветкою з мікрофібри.
13. Під час купання або прийняття душу обов'язково знімайте лінзи та носіть окуляри для плавання.
14. Не використовуйте очні краплі під час носіння лінз. Спробуйте одягти лінзи не менше ніж за чотири години після застосування очних крапель.
15. Не перевищуйте термін придатності лінз і не використовуйте лінзи більше терміну та пошкоджені
16. Не використовуйте лінзи, що використовувалися іншою людиною.
17. Рекомендована тривалість носіння лінз - 8 годин на добу.
18. Обов'язково знімайте лінзи перед сном.
19. Вагітні жінки повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням лінз.
20. Ті, хто тривалий час в умовах роботи піддаються сильній кислотності, слабкій лужності, впливу пилу або металу, повинні утримуватися від використання лінз.
21. При повторному використанні лінз обов'язково попередньо їх промивайте.
22. Періодично мийте інструменти (крім лінз), аби вони залишалися чистими
23. Миття лінз ультразвуковими хвилями може розірвати лінзи, тому будьте обережні при використанні.
24. Не використовуйте при пошкодженні стерилізованої упаковки.
25. При носінні контактних лінз будьте обережні, щоб не переплутати ліву і праву лінзи, рекомендуємо - завжди починайте з правого ока. Контейнери для зберігання позначені різною символікою для правого та лівого ока.

* Як реагувати на симптоми під час носіння контактних лінз

• Початкові симптоми

Симптоми	Причини	Лікування
Надмірна сльозотеча. Розпливчатість бачення. Лінзи легко повертаються. Незначне перенавантаження. Відчуття подразнення. Надмірна сльозотеча і занадто сильне подразнення.	Це цілком природні симптоми, що з'являються одразу після одягання лінз. Неналежне промивання.	Користувачі звикають до таких явищ з індивідуальними відмінностями. Якщо це продовжує турбувати, краще зверніться до фахівця. Обережно промивайте лінзи розчином для очищення і ретельно ополіскуйте їх розчином для зберігання перед використанням.

Відчуття гострого болю і багато виділень	Відкладення на лінзах сторонніх речовин внаслідок тривалого носіння лінз. Проблеми або з лінзами, або з очима.	Негайно зверніться до лікаря і дотримуйтесь його рекомендацій.
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

• Тривалі симптоми

Симптоми	Причини	Лікування
Розпливчатість бачення.	Відкладення на лінзах сторонніх речовин.	Промийте лінзи миючим розчином і, якщо симптоми не зникають видаліть сторонні речовини розчином для видалення білка. Вимийте лінзи та зверніться до фахівця.

Подазнення/біль	Сторонні речовини, пил або подряпини на лінзах.	
Перевантаження та розмиття	Відкладення жиру або білку на лінзах, або занадто тривале носіння.	Обережно промийте лінзи. Зніміть лінзи і відпочиньте.

Перевіряйте свої очі щодня, і якщо ви відчуваєте щось ненормальне, спробуйте вищезазначені заходи. Якщо симптоми продовжуватимуть турбувати, проконсультуйтеся з лікарем-офтальмологом.

* Заходи безпеки для побічних ефектів

Якщо виникають проблеми, наведені нижче, перевірте заходи безпеки.

- Подразнення, відчуття печіння, біль і інші захворювання очей
- Відчуття подразнення від лінз
- Очі опухлі і болючі
- Очні захворювання, такі як кон'юнктивит, кератит
- Надмірна сльозотеча
- Аномальна кількість секретії
- Перевантаження і сухість очей
- Обмеженість або порушення зору
- Орепи навколо об'єктів
- Обертання лінз через зміщення вісі (торичні)
- Обертання лінз і переміщення з вісі (торичні)

Коригувальні заходи

- Зніміть лінзи. Якщо проблема зникне, перевірте лінзи і, навіть якщо не виникає проблем, проконсультуйтеся зі своїм офтальмологом перед повторним використанням.
- Якщо лінзи забруднені, промийте їх та знову вставте. Якщо проблема виникає знову, зверніться до лікаря-офтальмолога.

* **Забороно**

Ті, хто має симптоми, наведені нижче, не повинні використовувати лінзи

- Гостре або напівгостре запалення між лінзами і рогівкою і райдужною оболонкою
- Інші захворювання очей, травми, проблеми рогівки і вій
- Незручність, біль, свербіж, виражена або безперервна сухість очей
- Хвороби, які можуть впливати на очі при носінні лінз
- Алергічна реакція на лінзи
- Системне захворювання, яке може впливати на очне яблуко, або можливість того, що носіння лінз може погіршити системне захворювання
- Стан, який робить неможливим дотримання відповідних правил використання лінз.

Дата останнього перегляду 19.02.2024 р.



UA-TR-116

STERILE &
СТЕРИЛЬНО